



Ethylotest Jetable

Produit estampillé NF Ethylotest Fabrication française 1 test réactif
 Seuil : 0,25 mg par litre d'air expiré équivalent à 0,5 g par litre de sang
 Une simplicité d'utilisation inégalée à ce jour. · Une compacité remarquable. · Une totale garantie d'hygiène et sécurité : embout buccal, clapet anti-retour. · Une protection de l'environnement : pas de poche plastique non biodégradable, conformité chrome, embout plastique biodégradable. · Des performances certifiées par la conformité à la NFX 20-702:2014

Comment utiliser votre éthylotest :
 Tenir l'éthylotest et l'embout buccal pendant 30 secondes dans vos mains fermées Perforer les opercules à chaque extrémité à l'aide de l'embout buccal Insérer l'embout buccal sur l'éthylotest du côté de l'anneau rouge Inspirer profondément puis souffler lentement dans l'embout buccal en une seule fois dans le sens indiqué. Le souffle doit être continu et sans interruption

Comment interpréter son résultat :
 Attendre que la pastille redevienne entièrement rouge. Comparer la couleur obtenue à celles du nuancier fourni Au-delà de 10 min, l'interprétation n'est plus possible

A savoir :
 Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou autres substances (spray, médicament, ...) avant d'effectuer votre test. L'alcoolémie maximale est atteinte 45 à 60 min après le dernier verre d'alcool. Températures d'utilisation : 5°C à 40°C Températures de stockage : -20°C à 70°C Article L-230-2 : L'employeur a la responsabilité de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs.

[embed]<https://youtu.be/mkqY69nurro>[/embed]

SKU: 10ETJ0000