

Garrot Tourniquet Noir



Descriptif : Garrot tourniquet avec sangle de serrage de largeur 4 cm : La sangle de 4 cm de large assure une compression plus élevée que la plupart d'autres tourniquets standard, qui ont souvent une large boucle, mais une sangle de seulement 2,5 cm ; le confort du blessé est également amélioré. Il ne nécessite aucun velcro pour maintenir la pression, il est donc plus fiable. Il est léger et compact Le garrot fonctionne même s'il est sale ou mouillé. La sangle est très résistante et lavable. Mode opératoire : la pose est possible d'une seule main 1. Repérer la boucle du garrot tourniquet et passer la autour du membre concerné par l'hémorragie. 2. Poser le garrot au niveau du membre atteint (bras ou cuisse) : - au dessus du coude ou du genou, - entre la blessure et le cœur, - jamais sur une articulation. 3. Tirer sur la sangle pour serrer la boucle autour du membre. 4. Tourner la poignée aluminium pour arrêter le saignement. 5. Verrouiller la poignée en insérant une des extrémités dans le crochet rigide en plastique. 6. Noter l'heure de la pose du garrot et surveiller l'arrêt du saignement. 7. Rechercher immédiatement une aide médicale.

SKU: 10GAT0000