



Stylo oculaire aimanté

Vendu à l'unité Doté d'un côté avec aimant, permettant ainsi de retirer facilement et sans danger les échardes métalliques au niveau de l'oeil. De l'autre côté, une boucle en nylon permet de retirer les échardes non métalliques, les poussières. Pratique à ranger et hygiénique grâce aux embouts qui peuvent s'emboîter dans le corps du crayon.

Caractéristiques techniques Dimensions (Lxlxh) 12 x 1 x 1 cm

Instructions d'utilisation -Approcher prudemment l'aimant de la limaille et/ou utiliser la boucle en nylon pour retirer l'écharde. -Effectuer l'extraction et rincer abondamment avec de l'eau ou solution oculaire NaCl -Après usage, immerger pendant 5 minutes la pointe magnétique et la boucle en nylon dans une solution désinfectante non corrosive.

Classification Dispositif médical de Classe 1

SKU: 10STO0001