



Test salivaire Narcocheck monodrogue THC par lot de 10

Vendu par lot de 10 tests Ce test permet le dépistage salivaire du THC, c'est à dire la substance active du cannabis. Ce test est un outil qualitatif, de type "NON / OUI", et délivrera donc un résultat "NEGATIF" ou "POSITIF" pour chacune des drogues. La détection du cannabis n'a jamais été aussi efficace ! Ce test salivaire cible le $\Delta 9$ -THC, c'est à dire la molécule de cannabis que l'on retrouve spécifiquement dans la bouche. La fumée des cigarettes de cannabis en est saturée. Cette fumée va contaminer la cavité buccale lorsqu'une personne fume un joint, et y laisse des traces pendant plusieurs heures. Ainsi, ce test salivaire détecte notamment les mêmes traces de cannabis que celles recherchées lors des dépistages pratiqués en bord de route par la Police et la Gendarmerie. Il s'agit donc d'une véritable innovation en matière de dépistage salivaire, et non d'un simple test urinaire modifié. Données techniques: Seuils de détection : 10 ng/ml. Si l'échantillon de salive analysé concentre un niveau de THC supérieur au seuil indiqué, le test sera positif, sinon le test sera négatif. Test salivaire cannabis ($\Delta 9$ -THC 10) NarcoCheck® substances détectées: $\Delta 9$ -THC (cannabis pur) concentration (ng/ml): 10 Temps de détection du cannabis dans la salive : quel que soit le test utilisé, le THC (principe actif du cannabis) ne peut en aucun cas être détecté plus de 4 à 6 heures dans la salive. Le seuil de détection extrêmement bas du test salivaire NarcoCheck permet d'exploiter pleinement cette fenêtre de temps. Le temps de détection de notre test sera donc de 4 à 6 heures après le dernier joint fumé, quel que soit le niveau de consommation. Mode d'emploi 1- Placer la languette en bouche et saliver dessus quelques secondes. 2- Le test démarre automatiquement. 3- Lire les résultats après 10 minutes.

SKU: 10TSM0010