



Rouleau sparadrap micropore sur dévidoir 2.5cmX9m

DESCRIPTION: Élaboré à partir de polyester non-tissé (20%) et de cellulose (80%), le sparadrap Omnipor Plus est indiqué dans la fixation d'un pansement, d'une sonde, mais également pour maintenir une canule chez les patients à la peau sensible. Également, l'Omnipor Plus bénéficie d'un support microporeux. Par conséquent, il se veut perméable à l'air ainsi qu'à la vapeur d'eau. En utilisant ce type de sparadrap, vous favorisez le processus de cicatrisation naturelle. De plus, il est garanti sans latex de façon à convenir à tous les types de peaux y compris les plus sensibles. Grâce au savoir-faire du groupe Hartmann et à des matériaux de qualité, le sparadrap Omnipor Plus se retire sans la moindre douleur. Dispositif médical marqué CE de classe 1, ce dernier se veut non élastique. Disposé sur son dévidoir, le sparadrap Omnipor Plus vous est proposé sur la boutique Prodiffusion à l'unité dans le format suivant : Rouleau de 2,5 cm de large par 5 mètres de long, Et dans un coloris blanc. Conseils d'utilisation: En seulement trois étapes, vous réussirez à fixer efficacement votre pansement avec le sparadrap Omnipor Plus : 1 Avant toute utilisation, le sparadrap Omnipor Plus doit être appliqué sur une peau parfaitement propre, sèche et non lésée. 2 Découpez le sparadrap à la longueur désirée à l'aide d'une paire de ciseaux. 3 Positionnez-le sur l'élément à fixer et exercez une légère pression pour garantir son adhésivité à la peau. Pour une adhérence optimale, il est conseillé d'éviter d'apposer le sparadrap sur des traces de produits gras comme de la pommade, etc. Composition du sparadrap Omnipor Plus

Retrouvez, ci-dessous, la composition détaillée de cet article de soin : Support non-tissé : 20 % polyester / 80 % cellulose- 75 g/m², Liant : éthyl vinyl acétate, Masse adhésive : caoutchouc synthétique - Hotmelt (haute tolérance cutanée), Bobine : polystyrène.

SKU: 6SBM0001