



Coussin hémostatique d'urgence 10x14 cm stérile

Description : Bande élastiquée, coussin en mousse, compresse tissée – Produit stérile (stérilisation à l’oxyde d’éthylène). Geste de premières urgences pour compresser une hémorragie externe sur un membre et ainsi stopper le saignement sans couper la circulation sanguine. Il ne présente aucun risque de pose et donne un délai supplémentaire pour l’évacuation vers un centre hospitalier. Facile à utiliser. Livré avec une paire de gants pour éviter toute contamination. Matière : Bande élastiquée, coussin en mousse, compresse tissée Couleur : Blanc Dimensions : Bande 90x10cm, coussin 12,5x10,5x2,8cm, compresse 10x14cm Poids : 11g. Normes et certification: Dispositif Médical de classe Is selon le Règlement (UE) 2017/745. Instructions d’utilisation : - Ouvrir le sachet, mettre les gants et dérouler la bande. - Poser le coussin côté compresse sur la plaie. - Appuyer fermement le coussin. - Enrouler la bande autour du membre en maintenant la pression sur le coussin. - Le secouriste peut désormais se libérer de la compression manuelle et traiter d'autres urgences. - Contrôler régulièrement le pouls en aval de la plaie. En cas d'affaiblissement de celui-ci, relâcher la pression de la bande. Précautions d’emploi et Contre-indications: - A usage unique. - Destiné à un usage externe. - Conserver hors de portée des enfants. - Ne pas utiliser si le sachet est ouvert ou endommagé. - Stocker dans un endroit sec et à température ambiante. - Après utilisation, à jeter avec déchets médicaux. Date de validité : 5 ans.

SKU: